

PENGUKUR TEKANAN DARAH OTOMATIS



HEM - 8712

- Deteksi Pergerakan Tubuh ()
- Panduan Pemakaian Manset ()
- Teknologi **IntelliSense**

DAFTAR ISI


Pengenalan Alat 1
 Petunjuk Penggunaan 2
 Penyimpanan dan Pemeliharaan 3
 Masalah dan Solusinya 4

PENGENALAN ALAT

- A. Display
- B. Tombol START/STOP
- C. Tempat Baterai
- D. Jack AC Adaptor (untuk opsional AC Adaptor)
- E. Jack Udara
- F. Manset Lengan (Lingkar lengan: 22 – 32cm)
- G. Plug Udara
- H. Selang Udara
- I. Marker
- J. Simbol Memori
- K. Tekanan Darah Sistolik
- L. Tekanan Darah Diastolik
- M. Simbol Baterai Lemah
- N. Panduan Pemakaian Manset
- O. Simbol Detak Jantung (berkedip selama pengukuran). Apabila tekanan darah diluar range (135/85 mmHg) maka simbol detak jantung akan berkedip ()
- P. Simbol Pergerakan Tubuh
- R. Display Denyut
- T. Simbol Deflasi

PENGGANTIAN BATERAI

1. Lepaskan penutup baterai
2. Masukkan 4 baterai “AA” dan tutup kembali

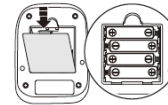

- Jika simbol baterai lemah muncul, ganti semua baterai bersamaan
- Nilai pengukuran tetap tersimpan dalam memori walaupun baterai diganti
- Baterai yang disertakan mungkin memiliki hidup lebih pendek

PENGUNAAN AC ADAPTOR (Opsional)

1. Masukkan plug AC adaptor ke jack AC adaptor pada bagian belakang unit
2. Sambungkan AC adaptor ke stop kontak



PETUNJUK PENGGUNAAN

** Jangan gunakan lengan baju yang ketat atau tebal

1. Masukkan plug udara ke jack udara



2. Gunakan manset pada lengan atas. Bagian bawah manset berada 1-2 cm diatas siku. Marker berada di tengah lengan dalam.

Kencangkan manset




3. Kencangkan manset



NOTE :
 Jika anda mengukur pada tangan kanan, selang udara akan berada pada sisi siku anda. Pastikan lengan anda tidak berada diatas selang udara.


Nilai tekanan darah lengan kanan dan kiri dapat berbeda. OMRON selalu menyarankan untuk menggunakan lengan yang sama untuk pengukuran. Jika nilasi hasil pengukuran berbeda jauh, konsultasikan dengan tenaga medis

4. Saat melakukan pengukuran, Anda harus duduk dengan tenang dan tegak. Jangan mandi, minum alkohol/ caffeine, merokok, berolah raga, atau makan, 30 menit sebelum melakukan pengukuran. Duduklah dengan tegak, kaki menapak di lantai. Pastikan level ketinggian manset sama dengan jantung.

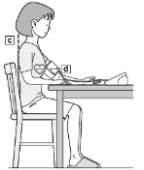

Untuk membatalkan pengukuran, tekan tombol START/STOP untuk mematikan unit dan mengeluarkan udara dari dalam manset. Harap jangan bergerak selama pengukuran

5. Tekan tombol START/STOP untuk memulai pengukuran, manset akan mengembang otomatis.

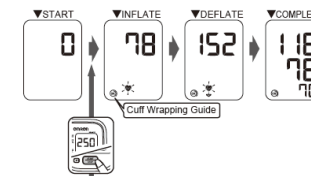

Jika nilai tekanan darah anda lebih dari 210 mmHg, setelah manset mengembang tekan tombol START/STOP sampai mengembang 30-40 mmHg lebih tinggi dari nilai tekanan yang diharapkan. Monitor tidak akan mengembang lebih dari 299 mmHg. Jangan menerapkan tekanan lebih dari yang ditentukan

Panduan Pemakaian Manset

Merupakan salah satu fitur unik yang menunjukkan apakah manset sudah terpasang kencang atau tidak. Walaupun muncul pada display, pengukuran tetap dilakukan. Akan tetapi hasil pengukuran tidak akurat. Jika muncul maka manset sudah terpasang kencang dan hasil pengukuran akurat.

6. Lepaskan manset. Jika anda ingin melakukan pengukuran lagi, tunggu selama 2-3 menit
7. Tekan tombol START/STOP untuk mematikan monitor. Monitor dapat otomatis mati dalam 2 menit

PENTING :



Standard pengukuran sendiri :

Tekanan Darah Systolic	Diatas 135 mmHg
Tekanan Darah Diastolic	Diatas 85 mmHg

- Jika anda bergerak selama pengukuran, simbol Pergerakan Tubuh akan muncul pada monitor. Ulangi pengukuran dan jangan bergerak.

PENGUNAAN FUNGSI MEMORI

Unit otomatis menyimpan hasil pengukuran terakhir (tekanan darah dan denyut nadi).

Tekan tombol START/STOP lebih dari 5 detik untuk melihat hasil pengukuran Untuk menghapus, Tekan tombol START/STOP selama lebih dari 15 detik

PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN

- Pastikan unit dan manset terkena suhu ekstrim, kelembaban, atau terkena paparan sinar matahari langsung
- Jangan melipat manset atau selang terlalu kencang
- Jangan mengembungkan manset lebih dari 299 mmHg
- Jangan membongkar unit
- Jangan letakkan unit pada tempat dengan guncangan/ getaran kuat (contoh : menjatuhkan unit ke lantai)
- Jangan menggunakan cairan yang mudah menguap untuk membersihkan unit
- Jangan cuci manset atau merendam dalam air
- Jangan menggunakan minyak tanah, thinner, atau larutan lainnya untuk membersihkan manset
- Jangan memperbaiki sendiri; Jika terjadi masalah hubungi Customer Service OMRON Healthcare



- Unit harus dibersihkan dengan kain bersih dan lembut
- Gunakan kain lembut dan sabun untuk membersihkan manset

KALIBRASI DAN SERVICE

- Keakuratan dari pengukur tekanan darah telah diuji dan dirancang untuk umur service yang panjang
- Direkomendasikan untuk memeriksakan fungsi dan keakuratan setiap 2 (dua) tahun

PENYIMPANAN

1. Lepaskan plug udara dari jack udara
2. Lipat selang udara ke dalam manset dengan perlahan




Jangan simpan unit dalam keadaan berikut :

- * Unit basah
- * Terkena suhu ekstrim, lembab, paparan sinar matahari, debu atau uap korosif
- * Terkena vibrasi, terjatuh, dsb

OPSIONAL

Manset Medium
Lingkar lengan 22 – 32 cm

Manset Large
Lingkar lengan 22 – 42 cm

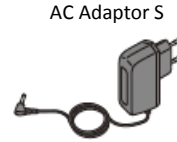

MASALAH DAN SOLUSINYA

Display Error/ Masalah	Penyebab	Solusi
	Bergerak selama pengukuran	Ulangi pengukuran dan jangan berbicara / bergerak selama pengukuran.
	Manset tidak terpasang dengan benar	Ulangi pemakaian manset
	Baterai lemah	Harap ganti dengan baterai baru
	Baterai habis	Harap ganti dengan baterai baru
E1	Selang udara tidak terhubung benar	Periksa sambungan selang
	Manset tidak terpasang dengan benar	Ulangi pemakaian manset
	Udara bocor dari dalam manset	Harap ganti dengan manset baru
E2	Bergerak selama pengukuran dan manset tidak mengembang sempurna	Ulangi pengukuran dan jangan bicara/bergerak selama pengukuran
		Jika "E2" sering muncul, kembangkan manset secara manual sampai 30-40 mmHg lebih tinggi dari tekanan yang diharapkan
E3	Tekanan melebihi 299 mmHg ketika manset mengembang manual	Jangan mengembungkan manset lebih dari 299 mmHg

Display Error/ Masalah	Penyebab	Solusi
E4	Bergerak selama pengukuran	Ulangi pengukuran dan jangan bicara/bergerak selama pengukuran
E5	Lengan pakaian mengganggu pengukuran	Jangan menggunakan pakaian dengan lengan yang terlalu tebal/ ketat
E _r	Alat error	Hubungi customer service Omron Healthcare
Hasil terlalu rendah atau terlalu tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah manset sudah terpasang dengan benar • Bergerak atau berbicara selama pengukuran • Lengan pakaian mengganggu pengukuran 	<ul style="list-style-type: none"> • Lilit manset dengan benar dan erat • Harap tenang dan jangan bergerak atau berbicara selama pengukuran • Jangan menggunakan pakaian dengan lengan yang terlalu tebal/ ketat
Manset tidak mengembang	Selang udara tidak terhubung benar	Periksa sambungan selang
	Udara bocor dari manset	Harap ganti dengan manset baru
Manset terlalu cepat mengempis	Manset terlalu longgar	Gunakan manset dengan benar dan erat
Tidak dapat melakukan pengukuran/ hasil terlalu rendah atau tinggi	Manset tidak mengembang sempurna	Kembangkan manset secara manual sampai 30-40 mmHg lebih tinggi dari hasil pengukuran sebelumnya
Tidak ada yang terjadi saat anda menekan tombol	Baterai habis	Harap ganti dengan baterai baru
	Polaritas baterai tidak benar	Periksa dan perbaiki polaritas baterai
Masalah lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Tekan tombol START/ STOP dan ulangi pengukuran • Jika masih terjadi masalah, harap ganti baterai dengan yang baru • Jika masalah masih belum terselesaikan, harap hubungi customer service OMRON Healthcare 	